




Γυαλιά LED Νυσταγμός

REF 803/823

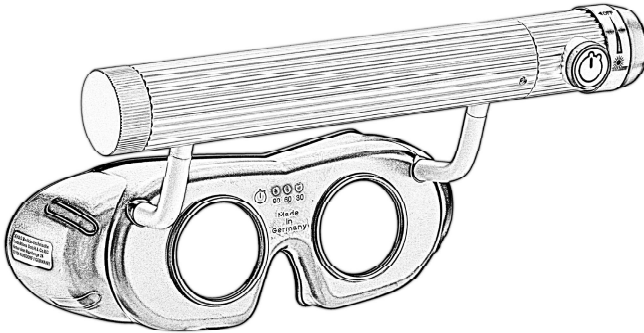

Οδηγίες χρήσης



v202307-AA

Αγαπητοί Πελάτες,

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτών των LED γυαλιών νυσταγμού. Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τα νέα σας LED γυαλιά νυσταγμού για να διασφαλίσετε τον σωστό χειρισμό και τη μεγάλη διάρκεια ζωής.

**Περαιτέρω γλώσσες των οδηγιών χρήσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας [www.dehag.com](http://www.dehag.com).**

Τα LED γυαλιά νυσταγμού είναι ένα όργανο εξέτασης που χρησιμεύει για την παρατήρηση των γρήγορων αυθόρ-μητων οφθαλμικών κινήσεων (νυσταγμός) σε ασθενείς με διαταραχές της αίσθησης ισορροπίας.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και χρησιμοποιήστε τα LED γυαλιά νυσταγμού μόνο όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες για να αποφύγετε τυχαίο τραυματισμό ή ζημιά. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Εάν παραδώσετε τα LED γυαλιά νυσταγμού σε κάποιον άλλον, παρακαλείστε να παραδώσετε και αυτές τις οδηγίες χρήσης.

### **Σημείωση για τον χρήστη**

Κάθε σοβαρό περιστατικό που συνέβη σε σχέση με τα LED γυαλιά νυσταγμού πρέπει να αναφέρεται στην DEHAG Medizin-Technische Produktions GmbH & Co. KG και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

## Πίνακας περιεχομένων

- Οδηγίες ασφαλείας
- Περιεχόμενα Συσκευασίας
- Θέση σε λειτουργία
- Οδηγίες προετοιμασίας
- Διάθεση
- Dati tecnici
- Όροι εγγύησης
- Εξυπηρέτηση πελατών
- CE
- Σύμβολα

## Οδηγίες ασφαλείας

### Γενικά



- Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες προσεκτικά και αποθηκεύστε τες για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιήστε τα LED γυαλιά νυσταγμού αποκλειστικά σύμφωνα με τις ΠΑΡΟΥΣΕΣ οδηγίες.
- Οι φακοί είναι πολύ ευαίσθητοι και γι' αυτό ο χειρισμός των γυαλιών πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή.
- Μην τοποθετείτε τα LED γυαλιά νυσταγμού πάνω σε επιφάνειες που μπορεί να γρατζουνίσουν τους φακούς.
- Τοποθετείτε πάντα τα LED γυαλιά νυσταγμού στο αφαιρούμενο ένθετο μέσα στο εξωτερικό κουτί.
- Τα LED γυαλιά νυσταγμού πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από ιατρικό προσωπικό. Οι οδηγίες χρήσης δεν αντικαθιστούν μια σωστή ιατρική εκπαίδευση.
- Η μη συμμόρφωση ή η ακατάλληλη χρήση απαλλάσσει τον κατασκευαστή από κάθε ευθύνη.
- Ελέγχετε τα LED γυαλιά νυσταγμού πριν από κάθε χρήση για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και δεν έχουν υποστεί ζημιές.
- Τυχόν επισκευές θα πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.



- Αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν στείλετε τα LED γυαλιά νυσταγμού.
- Μην επιχειρείτε ποτέ να επιδιορθώσετε τα LED γυαλιά νυσταγμού μόνοι σας.
- Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται κατά τις επισκευές πρέπει να είναι πάντα γνήσια και να εγκαθιστώνται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση.
- Οποιαδήποτε αλλαγή οδηγεί σε αποκλεισμό της ευθύνης.
- Η σήμανση CE παύει να ισχύει σε περίπτωση χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Σε περίπτωση μεταβίβασης της συσκευής σε τρίτους, θα πρέπει να παραδίδεται και το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

### Προειδοποιήσεις



- Μη χρησιμοποιείτε όργανα που έχουν υποστεί ζημιά!
- Προστατεύστε τα LED γυαλιά νυσταγμού και τα εξαρτήματά τους από τυχόν μηχανική βλάβη ή καταπόνηση!
- Μην χτυπάτε τους φακούς, διότι ενδέχεται να σπάσουν και να προκαλέσουν ζημιά!
- Μην πετάτε!
- Μην ασκείτε βία!

- Μην εκθέτετε τα LED γυαλιά νυσταγμού και τα αξεσουάρ σε άμεσο ηλιακό φως και προστατέψτε τα από υγρασία και υγρασία άνω του 75%!
- Η κακή χρήση, η βλάβη και η φθορά δεν καλύπτονται από την εγγύηση!
- Η φθορά που προκαλείται από την κανονική χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση!
- Βεβαιωθείτε απολύτως ότι κανένα υγρό δεν εισέρχεται στα LED γυαλιά νυσταγμού ή στα αξεσουάρ!
- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι στεγνές!

### **Προβλεπόμενη χρήση**

Συσκευή για βραχυπρόθεσμες εξετάσεις ή για φορητή χρήση στον τομέα της διάγνωσης του ιλίγγου.

### **Ενδείξεις/Αντενδείξεις**

Κατά πόσο ενδείκνυται η χρήση των LED γυαλιά νυσταγμού εξαρτάται από τον τύπο του υπό εξέταση νυσταγμού. Για παράδειγμα, τα γυαλιά LED γυαλιά νυσταγμού χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του αυθόρμητου νυσταγμού, αλλά δεν είναι κατάλληλα για την παρατήρηση κατευθυντικού νυσταγμού.

### **Παρενέργειες και υπολειπόμενοι κίνδυνοι**


Μόλυνση λόγω μη τήρησης των οδηγιών επανεπεξεργασίας, λανθασμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων.

## Ηλεκτρική ενέργεια



- Για να εξασφαλίσετε την τροφοδοσία των LED γυαλιά νυσταγμού, χρησιμοποιήστε τρεις μπαταρίες μεγέθους C LR14/AM-2 (baby cells) 1,5 βολτ η καθεμία.
- Προσέξτε τη σωστή πολικότητα κατά την τοποθέτηση των μπαταριών.

## Τοποθέτηση των μπαταριών

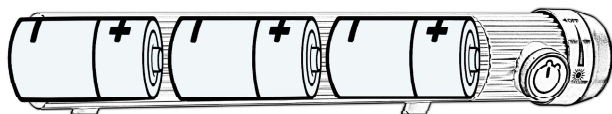

## Χρήση



- Πριν χρησιμοποιήσετε τα LED γυαλιά νυσταγμού, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει καθαριστεί πριν από κάθε χρήση και ότι βρίσκεται σε άθικτη, τεχνικά άριστη κατάσταση.
- Πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα εξαρτήματα που ορίζει ο κατασκευαστής.
- Ξεβιδώστε το κάλυμμα της λαβής μπαταρίας.
- Τοποθετήστε τρεις μπαταρίες (οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται) μεγέθους C LR14/AM-2 ή 1,5 volt (baby cells), τηρώντας τη σωστή πολικότητα.


- Στη συνέχεια, βιδώστε το κάλυμμα της μπαταρίας πίσω στη λαβή της μπαταρίας.
- Αφαιρέστε τις τρεις μπαταρίες από τη θήκη μπαταριών όταν δεν τις χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να αποφύγετε τη διαρροή των μπαταριών.

## Περιεχόμενα Συσκευασίας

- Ελέγξτε τη συσκευασία και αναφέρετε αμέσως τυχόν ζημιά στον μεταφορέα.
- Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας για τυχόν ζημιά που μπορεί να σημειώθηκε λόγω μη σωστού χειρισμού κατά τη μεταφορά.

Η συσκευασία των LED γυαλιών νυσταγμού περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα είδη. Εάν λείπει κάποιο από αυτά τα είδη, επικοινωνήστε με τον πωλητή σας.

- 1x LED Γυαλιά νυσταγμός Τύπος 803/823

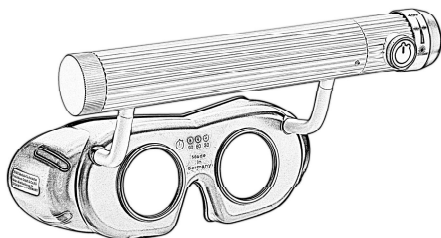



- 1x Οδηγίες χρήσης

1x κουτί



Γυαλιά LED Νυσταγμού  
REF 803/823



► Οδηγίες χρήσης



v2020-01



- 1x Ένθετο



## Θέση σε λειτουργία

### Γενικά

Με την αγορά των LED γυαλιά νυσταγμού τύπου 803/823 έχετε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μια βραχυπρόθεσμη εξέταση σε κινητή χρήση. Τα LED γυαλιά νυσταγμού συγκρατούνται απευθείας μπροστά από τα μάτια του ασθενούς και επιτρέπουν έτσι μια γρήγορη και απλή αναζήτηση για νυσταγμό πρόκλησης, π.χ. με κούνημα του κεφαλιού.

Τα LED γυαλιά νυσταγμού διαθέτουν σκληρούς διαθλαστικούς αμφίκυρτους μεγεθυντικούς φακούς με ισχύ +15 έως +18 διοπτρίες. Αποτρέπουν την οξεία όραση και την προσήλωση του βλέμματος σε αντικείμενα. Με αυτόν τον τρόπο, η οπτική επαφή του ασθενούς με τα αντικείμενα στον χώρο διακόπτεται, γεγονός που εμποδίζει τις γρήγορες κινήσεις των οφθαλμών. Ταυτόχρονα τα έντονα φωτισμένα μάτια μπορούν να παρατηρηθούν εύκολα με τη χρήση μεγεθυντικών φακών.

Τα LED γυαλιά νυσταγμού είναι εξοπλισμένα με λειτουργία χρονοδιακόπτη που διευκολύνει την παρατήρηση των εκτροπών εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Επιπλέον, τα γυαλιά είναι εξοπλισμένα με ενεργοποιημένη λειτουργία απενεργοποίησης. Εδώ, ο φωτισμός των γυαλιών απενεργοποιείται ένα λεπτό μετά τη λήξη του χρονοδιακόπτη- αν σηκώσετε ξανά τα γυαλιά, ενεργοποιούνται αυτόματα. Τα LED γυαλιά νυσταγμού διαθέτουν επίσης ένδειξη „χαμηλής μπαταρίας“, η οποία σηματοδοτεί ότι οι μπαταρίες πρέπει να αλλαχθούν όταν αδειάσουν.

## χρήση

- Πριν από κάθε χρήση, καθαρίζετε τα LED γυαλιά νυσταγμού με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Στη συνέχεια, στεγνώστε καλά τα γυαλιά με ένα μαλακό στεγνό πανί.
- Βεβαιωθείτε ότι τα LED γυαλιά νυσταγμού βρίσκονται σε άρτια και τεχνικά άριστη κατάσταση.
- Κρατήστε τα LED γυαλιά νυσταγμού πάνω από τη γέφυρα της μύτης μπροστά από τα μάτια του ασθενούς.
- Κρατήστε τα LED γυαλιά νυσταγμού από τη λαβή της μπαταρίας με το ένα χέρι.
- Ενεργοποιήστε τα LED γυαλιά νυσταγμού περιστρέφοντας τον περιστροφικό διακόπτη δεξιόστροφα.
- Συνεχίζοντας να περιστρέφετε τον περιστροφικό διακόπτη δεξιόστροφα, μπορείτε να εξασθενήσετε τη φωτεινότητα μέχρι τη στάση του περιστροφικού διακόπτη (περίπου 3/4 της στροφής).



Προσέξτε να μην υπερσφίξετε τον περιστροφικό διακόπτη, διαφορετικά ο διακόπτης μπορεί να καταστεί άχρηστος!

- Η απενεργοποίηση των LED γυαλιών νυσταγμού γίνεται με αντίστροφη σειρά.

- Για να εκκινήσετε τη λειτουργία χρονομέτρου, πρέπει να πατήσετε το κουμπί χρονομέτρου με το χρονόμετρο που εμφανίζεται στη λαβή της μπαταρίας. Η δίοδος που αναβοσβήνει σας δείχνει τη λήξη της αντίστοιχης χρονικής μονάδας (30, 60 ή 90 δευτερόλεπτα).
- Η φωτεινότητα των LED γυαλιών νυσταγμού ρυθμίζεται με την περιστροφή του περιστροφικού διακόπτη στη λαβή της μπαταρίας. Στρέφοντάς το προς την κατεύθυνση του 0 μειώνεται η φωτεινότητα-στρέφοντάς το προς την αντίθετη κατεύθυνση αυξάνεται η φωτεινότητα των LED.
- Με την αυτόματη απενεργοποίηση και ενεργοποίηση, τα γυαλιά LED γυαλιών νυσταγμού απενεργοποιούνται περίπου ένα λεπτό μετά τη λήξη του χρονοδιακόπτη. Η επαναφορά των γυαλιών LED γυαλιών νυσταγμού ενεργοποιεί ξανά τον φωτισμό.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη λαβή μπαταριών.

### **Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης**



- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία απενεργοποίησης, πρέπει να κρατήσετε πατημένο το κουμπί χρονοδιακόπτη στη λαβή της μπαταρίας και να ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα τον περιστροφικό διακόπτη.

- Αφού σβήσει η λυχνία LED 30 δευτερολέπτων (περίπου 1 δευτερόλεπτο), αφήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη και απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τα γυαλιά LED γυαλιών νυσταγμού. Μια σύντομη αναλαμπή της λυχνίας LED 30 δευτερολέπτων μετά την ενεργοποίηση σηματοδοτεί την απενεργοποιημένη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης.
- Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη απενεργοποίηση, προχωρήστε όπως για την απενεργοποίηση.

### Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας



- Η ένδειξη „Χαμηλή μπαταρία“ σας δείχνει όταν τα γυαλιά LED γυαλιών νυσταγμού είναι ενεργοποιημένα, καθώς και οι τρεις δίοδοι χρονοδιακόπτη αναβοσβήνουν πέντε φορές για να υποδείξουν ότι οι μπαταρίες είναι άδειες. Τοποθετήστε τρεις νέες, παρόμοιες μπαταρίες 1,5 V μεγέθους C LR14/AM-2 (baby cells), κατά προτίμηση αλκαλικές, σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

## Οδηγίες προετοιμασίας

Αποθηκεύστε τα LED γυαλιά νυσταγμού σε κλειστό χώρο που προστατεύεται από τη σκόνη και τη βρωμιά ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής.

Όλες οι επιφάνειες της μονάδας είναι αναισθητες σε κοινά, ήπια καθαριστικά μέσα. Όταν εφαρμόζετε τα υγρά καθαρισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί ή χαρτί στυψίματος για να αποφύγετε το γρατσούνισμα της επιφάνειας και να μπορέσετε να δοσολογήσετε και να διανείμετε καλύτερα τα υγρά. Ο εσφαλμένος ή ελλιπής καθαρισμός μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον ασθενή και το ιατρικό προσωπικό!

## Περιορισμοί ως προς την επεξεργασία

Το τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος καθορίζεται συνήθως από τη φθορά και τη ζημιά που έχει προ- κληθεί από τη χρήση.

## Σημεία χρήσης

Αφαιρέστε την επιφανειακή μόλυνση με ένα μαλακό πανί μίας χρήσης.

## Συντήρηση

Ξεχωρίστε τα χαλασμένα μέρη και επισκευάστε τα.

- Εάν στείλετε τα LED γυαλιά νυσταγμού για επισκευή, αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν τα στείλετε.

### **Καθαρισμός / απολύμανση: αυτόματα**



- Αυτόματος καθαρισμός και απολύμανση δεν εγκρίνονται για τη συσκευή αυτή.
- Μην απολυμαίνετε με ψεκασμό ή μούλιασμα!

### **Καθαρισμός/απολύμανση: χειροκίνητα**

Επικυρωμένη διαδικασία:



Προκαθαρισμός με πανί εμποτισμένο σε αιθανόλη 80%.

Σκουπίστε την απολύμανση με ένα μαλακό, μη χνουδωτό πανί, εμποτισμένο με ECOLAB incidin Oxy Foam S. Χρόνος αντίδρασης σύμφωνα με τον κατασκευαστή του απολυμαντικού 1 λεπτό.

Καθαρίζετε τα LED γυαλιά νυσταγμού μετά από κάθε χρήση.

- Καθαρίστε τα LED γυαλιά νυσταγμού με ένα υγρό πανί και ενδεχομένως κάποιο ήπιο απορρυπαντικό.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικές ουσίες, παράγοντες αφαίρεσης λίπους ή αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Στεγνώστε καλά τα LED γυαλιά νυσταγμού με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

- Μη βυθίζετε τα LED γυαλιά νυσταγμού σε νερό ή άλλα υγρά.

### **Στέγνωμα**

Αφήστε τη μονάδα να στεγνώσει για τουλάχιστον μία ώρα πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να αναφλεγεί ένα εκρηκτικό μείγμα αέρα και καθαριστικού κατά την ενεργοποίηση.

### **Έλεγχος και δοκιμή**

Ελέγχετε τα εξαρτήματα μετά τον καθαρισμό για τυχόν ίχνη βρωμιάς. Ενδέχεται να χρειαστεί να επαναλάβετε τον καθαρισμό.

### **Συσκευασία**

Τα LED γυαλιά νυσταγμού δεν χρειάζεται να συσκευάζονται σε αποστειρωμένη συσκευασία. Είναι επίσης δυνατή η χρήση άλλων συσκευασιών.

### **Άποστείρωση**

Μην αποστειρώνετε τα LED γυαλιά νυσταγμού, διότι τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μπορεί να καταστραφούν εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας.



## Διάθεση



Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, αυτό το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ή να επιστραφεί στον κατασκευαστή! Για την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύουν τα εξής: Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα μη διαλεγμένα αστικά απορρίμματα. Προετοιμάστε αυτό το προϊόν και τα εξαρτήματά του για ανακύκλωση ή χωριστή συλλογή σύμφωνα με την οδηγία. Η οδηγία δεν εφαρμόζεται σε μολυσμένα προϊόντα. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς!

## Dati tecnici

- Τύπος: 803 / 823
- Τροφοδοσία ισχύος: 3x μπαταρίες baby cells LR14/AM-2; ά 1,5V
- Διαστάσεις: 223 x 150 x 70 mm<sup>3</sup>
- Βάρος: περίπου 400 g (χωρίς μπαταρίες)
- Κατηγορία προστασίας: IP X0
- Ταξινόμηση: Κλάση I, σύμφωνα με το παράρτημα VIII της οδηγίας 2017/745 (EE)
- Ταξινόμηση: Ομάδα κινδύνου 1 σύμφωνα με το DIN EN 62471
- Σήμανση CE: σύμφωνα με την οδηγία 2017/745 (EE)
- Spaulding: μη κρίσιμο
- Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς:
  - Θερμοκρασία αποθήκευσης: -30 έως 60°C
  - Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 25 °C
  - Υγρασία: 30 έως 75 %
  - Βαρομετρική πίεση: 700 έως 1060 hPa

## Όροι εγγύησης

DEHAG Medizin-Technische Produktions GmbH & Co. KG εγγυάται αυτή τη συσκευή για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς υπό τους ακόλουθους όρους έναντι ζημιών που οφείλονται σε κατασκευαστικά ή/και υλικά ελαττώματα.

- Κατά τη διάρκεια της αναφερόμενης περιόδου εγγύησης δεν θα υπάρξουν χρεώσεις για εργασία, υλικά και έξοδα αποστολής. Η περίοδος εγγύησης δεν παρατείνεται από την επισκευή που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εγγύησης.
- Τα ελαττωματικά εξαρτήματα ή, σε περίπτωση ανταλλαγής, οι ίδιες οι ελαττωματικές μονάδες περιέρχονται αυτομάτως στην κυριότητα του κατασκευαστή.
- Κάθε αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς της εταιρείας.
- Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να υποβάλλονται είτε στον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν είτε στον κατασκευαστή.
- Η εγγύηση δεν ισχύει για ζημιές που προκαλούνται από:
  - Ατυχήματα, ακατάλληλη χρήση, φθορά ή/και αμέλεια.

- Λανθασμένη εγκατάσταση ή/και χρήση που παραβιάζει τα ισχύοντα νομικά και τεχνικά πρότυπα ή τα πρότυπα ασφαλείας.
- Για δυσλειτουργίες ή ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλο χειρισμό, ιδίως σε χειρισμό αντίθετο προς τις οδηγίες χρήσης ή σε ανεπαρκή ή λανθασμένη φροντίδα ή συντήρηση.
- Δυσλειτουργίες στον ηλεκτρικό εξοπλισμό που οφείλονται σε εξωτερικές επιδράσεις, όπως μεταβολές τάσης, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ραδιοπαρεμβολές κ.λπ.
- Επισκευή που πραγματοποιείται από τον πελάτη ή από τρίτους.
- Απρόσεκτη μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία ή προστασία.
- Η εγγύηση δεν αφορά μπαταρίες ή άλλα αξεσουάρ που ενδέχεται να περιλαμβάνονται στα LED γυαλιά νυσταγμού.
- Εκτός από την αντικατάσταση ή την επισκευή ελαττωματικών εξαρτημάτων, η εγγύηση δεν παρέχει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε επακόλουθη ζημία ή οποιαδήποτε άλλη συνέπεια που προκαλείται από ή σε σχέση με τη συσκευή που προμήθευσε.

- Τα έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας και ασφάλισης μεταφοράς βαρύνουν πάντοτε τον αγοραστή.
- Δεν υπάρχει καμία αξίωση εγγύησης για ελαττώματα που εμφανίζονται ή δηλώνονται μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης.

## Εξυπηρέτηση πελατών

Εάν παρουσιαστεί απροσδόκητα δυσλειτουργία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της DEHAG:



DEHAG Medizin-Technische  
Produktions GmbH & Co. KG  
Hinter dem Hamberge 24  
37124 ROSDORF / GERMANY  
Tel: 0551 / 3 25 19  
Fax: 0551 / 37 61 06  
E-mail: [info@dehag.com](mailto:info@dehag.com)  
Internet: [www.dehag.com](http://www.dehag.com)

## CE-Δήλωση συμμόρφωσης

Το σήμα CE επιβεβαιώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον κανονισμό 2017/745 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 05ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

## Σύμβολα

	Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης!
	Υπηρεσία
	Επικίνδυνη τάση!
	Καθαρισμός
	Κατασκευαστής
	Απόρριψη σύμφωνα με τις οδηγίες WEEE
	Κωδικός προϊόντος
	Ιατρική συσκευή
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν σύμφωνα με την οδηγία 2017/745 (ΕΕ)