



Occhiali Nystagmus TIPO 501

Descrizione del prodotto

I nostri affidabili e comprovati occhiali per nistagmo tipo 501 secondo il Prof. Frenzel per esami a lungo termine con:

- » occhiali solidi
- » illuminazione diretta
- » cavo di collegamento fisso

L'esame luminescente vero e proprio si svolge in una stanza buia o fortemente oscurata. L'illuminazione interna degli occhiali interrompe il contatto ottico del paziente con l'ambiente circostante (eliminazione della fissazione che inibisce il nistagmo). Allo stesso tempo, gli occhi luminosi sono particolarmente facili da osservare sotto le lenti d'ingrandimento. In molti casi, è possibile rilevare processi nistagmici patologici quando si guarda dritto davanti a sé, che non sono riconoscibili o non lo sono in modo affidabile senza occhiali, anche quando si guarda lateralmente.

L'alimentazione degli occhiali da nistagmo è fornita dalla batteria DEHAG tipo 504 o dall'alimentatore a spina tipo 506 (entrambi non inclusi). Il portabatterie DEHAG funziona con tre batterie C LR14/AM-2 (baby cell) da 1,5 volt ciascuna. L'impugnatura regolabile della batteria consente di regolare l'intensità della luce individualmente con una leggera rotazione dell'interruttore. L'alimentatore a spina viene collegato tramite una presa di corrente domestica standard (100-240V/AC, 50/60Hz).

Gli occhiali da nistagmo tipo 501 di Frenzel funzionano con due lampade da 4 volt, reperibili presso i rivenditori di articoli medicali.

Ambito di consegna



1x Occhiali da nistagmo tipo 501



1x archetto a clip tipo 58.01.01

Il copricapo a clip garantisce un fissaggio sicuro degli occhiali da nistagmo davanti agli occhi del paziente.

Accessori necessari



Alloggiamento per batteria DEHAG tipo 504

L'alloggiamento della batteria DEHAG viene utilizzato per alimentare gli occhiali da nistagmo e consente un lavoro regolabile e indipendente dalla rete elettrica nell'uso mobile.



Alimentatore a spina tipo 506

L'alimentatore a spina serve ad alimentare gli occhiali da nistagmo con una tensione di uscita di 4 V CC.

Parti di ricambio

**Lampada di ricambio tipo 507**

L'occhiale Nystagmus 501 è alimentato da due lampadine da 4 volt; 0,23 amp; 1 watt (diametro della filettatura 3,5 mm x 0,35 mm).

**Tipo di copertura 57.00.02**

Il coperchio protegge la lampadina.